

# Manual de utilizare

## Cuptor de preincalzire R-1905

Vă mulțumim pentru utilizarea acestui Cuptor de preincalzire R-1905. Pentru a utiliza corect produsul, vă rugăm să citiți cu atenție informațiile despre produs înainte de utilizare. Vă rugăm să păstrați manualul de utilizare pentru referință atunci când este necesar.

### Introducere:


Cuptorului R-1905 este echipat cu cel mai recent sistem de control, care are performanțe stabile, mai puternic și interfață om-mașină mai prietenoasă.



## Parametrii:

Model	<b>R-1905</b>
Voltaj	220 V
Curent	6.9 A
Putere	1500 W (MAX)
Frecventa	50 Hz
Greutate	29 Kg
Dimensiuni	450*340*470 mm
Temperatura maxima	999 °C

## Interfata:

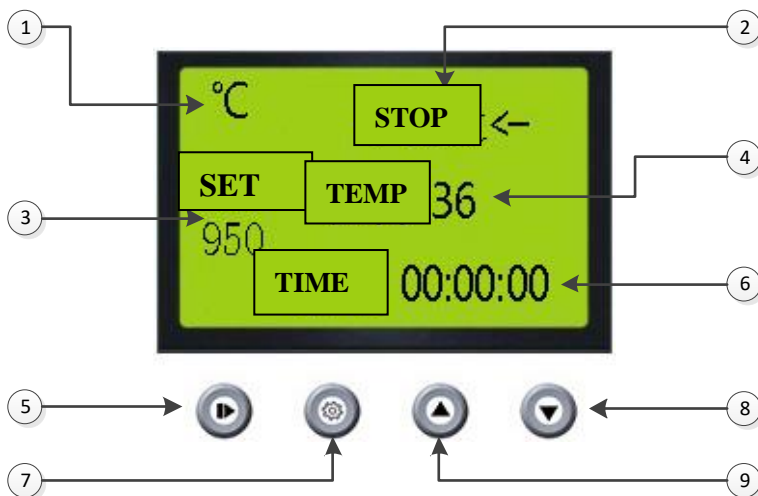

- (1) Simbol °C
- (2) Stare aparat
- (3) Temperatura finala
- (4) Temperatura in timp real
- (5) Buton Start / Stop
- (6) Timp
- (7) Buton de setare
- (8) Buton in jos / scadere
- (9) Buton in sus / crestere

## Functionarea aparatului:

Când echipamentul funcționează, există trei stări: stare de oprire, stare de setare și stare de funcționare. (2) zona indicată de săgeată va afișa starea de funcționare a echipamentului.

Precizia temperaturii Celsius în interiorul echipamentului este de 0,2 °C, iar cea a temperaturii Fahrenheit este de 0,4 °C.

(4) zona indicată de săgeată este zona de citire a temperaturii în timp real în cuptor.

### \* **Stare oprit.**

În modul oprit, puteți intra în starea de setare apăsând lung tasta de setare și puteți începe încălzirea apăsând tasta de pornire / oprire.

### \* **Stare de setare.**

În starea oprit, apăsați lung tasta indicată de săgeata (7) timp de 5 secunde pentru a intra în starea de setare, apoi atingeți butonul (7) pentru a schimba parametrul selectat. Parametrul selectat activat este afișat de săgeata din spatele lui.

În modul de setare, atingeți (8) pentru a reduce valoarea obiectului de setare și atingeți (9) pentru a crește valoarea obiectului de setare. Dacă tastatura nu este utilizată timp de 5 secunde, sistemul va ieși automat din setare.

### \* **Stare de funcționare.**

În starea de funcționare, echipamentul poate efectua încălzire într-o treaptă, încălzire în 2 trepte sau încălzire în 3 trepte conform parametrilor de setare. (5) apăsați tasta pentru a controla funcționarea echipamentului de pornire și oprire.

## **Informații de Securitate:**

Atenție: este strict interzis să dezamblați cutia echipamentului și să conectați circuitul echipamentului fără permisiune!

## **Atentie:**

1. Încălzirea într-o etapă a fost setată din fabrică la temperatura finală de 920 °C.

2. Priza de alimentare trebuie să fie legată efectiv la pământ.

**Notă:** Perioada de garanție a cablului electric și a termocuplei este de 6 luni.